

# Respirair Medium **Mascarilla de silicona**

Nuestras mascarillas están fabricadas en silicona y se adaptan perfectamente al contorno de la boca y nariz para proporcionar un mejor sellado, siendo extra suaves con la piel del rostro y evitando irritaciones.

Con una boquilla de 22 mm. redonda permiten un perfecto acoplamiento, impidiendo fugas de medicamento y la perfecta distribución del mismo.

Compatible con la mayoría de cámaras del mercado.

## Respirair Medium

**de 18 meses a 6 años**




## **MASCARILLA DE SILICONA**

**Boquilla universal de 22 mm. para cámaras de inhalación**

[www.respirair.es](http://www.respirair.es)

## INSTRUCCIONES DE USO

- Siga siempre las intrucciones del medicamento aerosol (MDI) y de la cámara de inhalación.
- Inserte el bote del medicamento (MDI) en el adaptador universal de la cámara.
- Conecte la mascarilla **Respirair**® a la boquilla de la cámara presionando ligeramente.
- Coloque ahora la mascarilla **Respirair**® sobre la cara del paciente, de manera que queden cubierta nariz y boca completamente.
- Presione ligeramente para que el contorno de la mascarilla se adhiera perfectamente sobre la cara del paciente. Exhale totalmente el aire.
- Accione el medicamento (MDI) y mantenga la cámara en la misma posición hasta que el paciente haya realizado 5 o 6 respiraciones.
- Retire la cámara y repita si fuera necesario una nueva dosis, siempre de acuerdo con las instrucciones del uso del inhalador o aerosol (MDI).

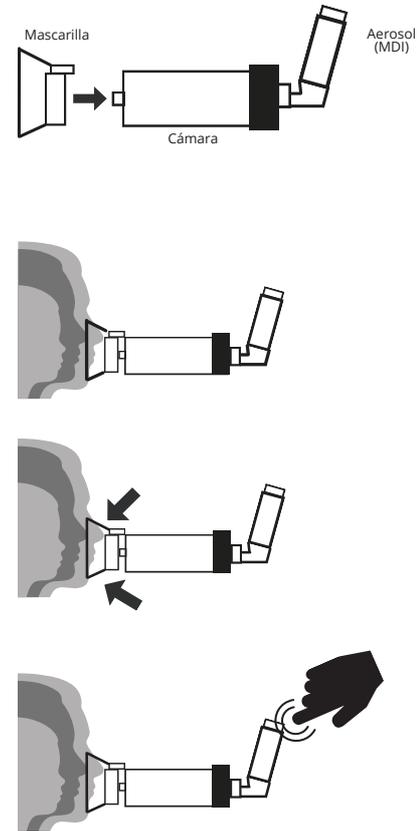

## INSTRUCCIONES CONSERVACION Y LIMPIEZA

- Antes de utilizar por primera vez la cámara o la mascarilla **Respirair**®, lávela siguiendo las instrucciones y se recomienda hacerlo una vez a la semana.
- Suméjrala durante 15 minutos en agua templada con un detergente líquido suave y frote suavemente.
- Aclare con agua limpia y sacuda el resto de humedad y espere a que se seque completamente.
- No utilice un paño para limpiarla o secarla, podría producir electricidad electrostática o dejar restos de pelusa.
- Vuelva a colocar la cámara **Respirair**® en la cámara inhaladora cuando esté totalmente seco y listo para utilizar.

## RECUERDE

- No es un juguete, mantener alejado de los niños.

[www.pharmacyline.es](http://www.pharmacyline.es)



Versión 1.1 01/06/2022

**Distribuido por:**  
Servicios de Marketing y  
Comunicación Enrédate S.L  
[info@respirair.es](mailto:info@respirair.es)

**EC REP**  
MedPath GmbH  
Mies-van-der-Rohe-Strasde 8, 80807  
Munich, Germany  
SRN: CN-MF-000007138

**Fabricado por:**  
Hubei Yi-Ya Protective Products Co.,  
Ltd  
Miandong Road. Hefeng Village, Xiliuhe  
Town, Xiantao City, Hubei Province,  
China